



Systemy Chusteczek Dezynfekcyjnych

ECO WIPES

Dozownik chusteczek

- **Dozownik wielokrotnego użycia do napełnienia nietkanymi chusteczkami ECO WIPES i do nasączenia preparatem do dezynfekcji powierzchni**



Opis produktu

ECO WIPES wielokrotnego użytku dozownik chusteczek do dezynfekcji i czyszczenia różnego rodzaju wyrobów oraz sprzętu medycznego. **ECO WIPES** składa się z wielokrotnego użytku dozownika oraz z rolek nietkanych chusteczek. Może być stosowany z gotowym do użycia preparatem do dezynfekcji, jak również z roztworem przygotowanym z koncentratu preparatu do dezynfekcji.

Chusteczki do przygotowania dozownika DESOTEX® są dołączane do każdego opakowania rolki z chusteczkami, żeby umożliwić higieniczne przygotowanie dozownika przed ponownym napełnieniem.

Zakres zastosowania

Dozownik chusteczek wielorazowego użytku do nasączania, higienicznego przygotowania i aplikacji preparatów do dezynfekcji powierzchni, do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów, sprzętu medycznego oraz wszystkich innych powierzchni.

Zastosowanie

Do użycia z gotowym preparatem do dezynfekcji lub przygotowanym zgodnie z instrukcją producenta preparatu. Przetrzeć powierzchnię nasączoną chusteczką **ECO WIPES** do całkowitego zmoczenia powierzchni następnie pozostaw do wyschnięcia podczas całego czasu kontaktu.

Instrukcja dla użytkownika

Napełnienie: Zdejmij pokrywę dozownika chusteczek i połóż ją na zewnątrz stołu roboczego. Weź rolkę suchych chusteczek z opakowania i włóż do dozownika (alternatywnie: włóż nasączone chusteczki w worku foliowym). Wlewaj płyn dezynfekcyjny powoli, spiralnie na chusteczki w rolce w dozowniku. Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka rolki, przeciągnij jej róg przez wycięcie w kształcie gwiazdy znajdujące się na pokrywie dozownika.

Mocno zamknij dozownik. Gdy zamykasz otwarcie pokrywy dozownika upewnij się, że wyciągnięta chusteczka całkowicie znajduje się pod pokrywą. Wypełnij załączoną etykietę i przyklej na pokrywie. Po 30 minutach chusteczki są gotowe do użycia. Wyrzuć pierwszą chusteczkę.

Za każdym razem **ECO WIPES** kiedy dozownik chusteczek ma zostać napełniony musi przejść proces czyszczenia i dezynfekcji. Obok procedury chemiczno-termicznej lub termicznej można przeprowadzić manualny reprocessing przy pomocy zestawu DESOTEX®. Zestaw chusteczek DESOTEX® jest dołączony do każdej rolki chusteczek. Zaleca się obejść dozownik przed reprocessingiem. W przypadku śladów zużycia pokrywa/ dozownik muszą zostać wymienione.

Czyszczenie: Dokładnie wyczyść wnętrze i krawędź nowego lub opróżnionego dozownika za pomocą chusteczki czyszczącej. Dokładnie oczyść krawędzie pokrywy, wewnętrzne powierzchnie i krawędzie otworu dozownika. Dokładnie wyczyść zewnętrzną stronę pokrywy i zewnętrzne powierzchnie dozownika.

Dezynfekcja: Dokładnie przetrzyj wnętrze i krawędź nowego lub opróżnionego dozownika za pomocą ściereczki dezynfekującej. Dokładnie wytrzyj wnętrze pokrywy, krawędzie pokrywy, wewnętrzne powierzchnie i krawędzie otworu dozownika. Dokładnie wytrzyj zewnętrzną stronę pokrywy i zewnętrzne powierzchnie dozownika.

Opinie ekspertów


Mamy obszerne raporty ekspertów dotyczące wszystkich naszych produktów. Na życzenie chętnie je udostępnimy.




ECO WIPES

Dozownik chusteczek


Przygotowanie

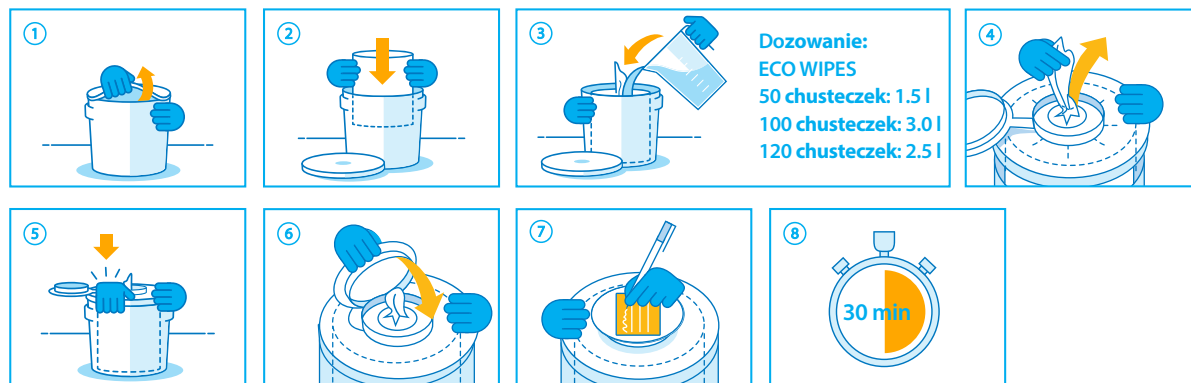

1 Czyszczenie

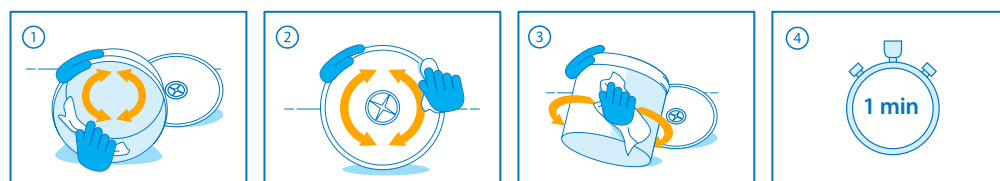

2 Dezynfekcja

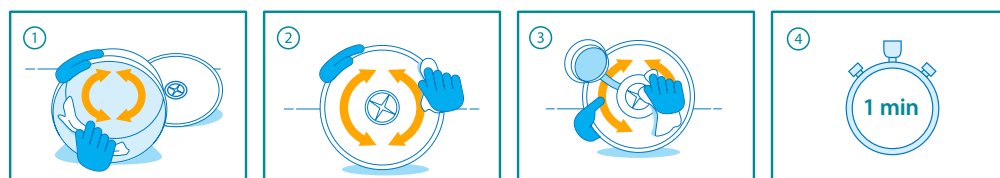

Produkt	Poj. opak.	Zawartość	Opak.zbiornicze	Rozmiar	Nr katalogowy
ECO WIPES	Dozownik	pusty	6	duży	00-915-SE001
	Dozownik	pusty	1	duży	00-915-SE002
	Dozownik	pusty	1	square, large	00-915-SE003
	Rolka chusteczek	100 chustek	3	30 x 32 cm	00-915-REW10003-01
	Rolka chusteczek	100 chustek	6	30 x 32 cm	00-915-REW10006-01
	Rolka chusteczek	120 chustek	6	17.5 x 36 cm	00-915-BW12006-01
	Rolka chusteczek	50 chustek	3	30 x 32 cm	00-915-REW5003-01
Akcesoria	Uchwyt ścienny	-	1	duży	00-902-EIM

